

SCHIENBEINSCHUTZ

EPITHELIUMTACT 03

INDIKATION:

Die EPITHELIUMTACT 03 Schienbeinschutzpflaster bestehen aus einem 2 mm dünnen Silikongel, das den Eigenschaften der menschlichen Haut sehr ähnelt. Durch direktes Anlegen auf der Haut verteilen die Schutzpflaster den Druck und fangen Reibungen auf dem Schienbein ab, indem die Energie im Gel verteilt wird, und beugen somit einem brennenden Gefühl vor. Die Knöchelschutzpflaster lindern auch den Schmerz und die sportlichen Aktivitäten können somit auf dem gewohnten Leistungsniveau ausgeübt werden. Sie tragen sich angenehm auf der Haut und das Entfernen ist selbst an behaarten Stellen schmerzfrei.

GEGENANZEIGE:

- Nicht über einer offenen Wunde verwenden.
- Für Personen mit Arteriiitis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Extremitäten oder venösen Ulzera: Dieses Produkt keinesfalls auf einer Wunde, einer Hautverletzung verwenden, der Haut während der Verwendung beobachten und gegebenenfalls Ihren Arzt oder Fußpfleger um Rat fragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Den durchsichtigen Schutzfilm abziehen (das Gewebe dabei nicht ablösen)
- Das Schutzpflaster auf der entsprechenden Zone direkt auf der Haut auflegen und andrücken. Sie können es ihn jederzeit abnehmen und neu positionieren.
- Am besten eine Socke darüber ziehen.
- Das Schutzpflaster in das hierfür vorgesehene Papieretui kleben und in der grauen Kunststoffhülle bis zur nächsten Verwendung aufbewahren.

WEITERE VERWENDUNG:

Die Schienbeinschutzpflaster sind ebenfalls sehr wirksam, um Druck an den Schultern beim Tragen eines Wanderrucksacks aufzunehmen und somit Schmerzen zu lindern.

PFLEGE:

- Die Schutzpflaster können mit Wasser und Seife gewaschen werden. Nicht reiben und an der Luft trocknen lassen.

ZUSAMMENSETZUNG: 90% Silikon, 10% Polyamid/Elasthan.

Das Produkt wurde allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte trotzdem eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

MILLET Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2014.



Von Hand waschbar.
(kein Dampf)



Nicht bügeln
(kein Dampf)



Bleichen mit Chlor
nicht erlaubt.

Nicht trommel-
trocknen.



LOT Siehe Verpackung.



Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
lavable et réutilisable
EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable

RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS
DISTRIBUTION OF PRESSURE AND FRICTION

DÉCOUVREZ LA GAMME EPITACT® SPORT:
DISCOVER THE EPITACT® SPORT RANGE:



Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.

www.epitactsport.com

PROTECTIONS TIBIALES EPITHELIUMTACT 03

SHIN PROTECTORS / SCHIENBEINSCHUTZ / PROTEZIONI TIBIALI /
PROTEÇÕES TIBIAIS / SCHEENBEENBESCHERMERS / PROTECCIONES
TIBIALES / SKINNEBENSBEKYTTELSER / SKENBENSŠKYDD / SÄÄRILUUN
SUOJAT / SKINNEBENPLASTER / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΝΗΜΙΩΝ



19372-C • 03/2017



MILLET Innovation

ZA Champgrand - BP64 - 26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com

www.epitactsport.com