

KNÖCHELSCHUTZ
EPITHELIUMTACT 04

INDIKATION:

Die EPITHELIUMTACT 04 Knöchelschutzpflaster bestehen aus einem 2 mm dünnen Silikongel, das den Eigenschaften der menschlichen Haut sehr ähnelt. Durch direktes Anlegen auf der Haut verteilen die Schutzpflaster den Druck und fangen Reibungen auf dem Knöchel ab, indem die Energie im Gel verteilt wird, und beugen somit einem brennenden Gefühl vor. Die Knöchelschutzpflaster lindern auch den Schmerz und die sportlichen Aktivitäten können somit auf dem gewohnten Leistungsniveau ausgeübt werden. Sie tragen sich angenehm auf der Haut und das Entfernen ist selbst an behaarten Stellen schmerzfrei.

GEGENANZEIGE:

- Nicht über einer offenen Wunde verwenden.
- Für Personen mit Arteriitis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Extremitäten oder venösen Ulzera: Dieses Produkt keinesfalls auf einer Wunde, einer Hautverletzung verwenden, den Fuß während der Verwendung beobachten und gegebenenfalls Ihren Arzt oder Fußpfleger um Rat fragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Die EPITHELIUMTACT 04 Schutzpflaster wurden speziell entwickelt, um empfindliche Zonen perfekt abzudecken (Knöchel, Kahnbein)
- Den durchsichtigen Schutzfilm abziehen (das Gewebe dabei nicht ablösen)
 - Das Schutzpflaster auf der entsprechenden Zone direkt auf der Haut auflegen und andrücken. Sie können es jederzeit abnehmen und neu positionieren.
 - Am besten eine Socke darüber ziehen.
 - Das Schutzpflaster in das hierfür vorgesehene Papieretui kleben und in der grauen Kunststoffhülle bis zur nächsten Verwendung aufbewahren.

PFLEGE:

- Die Schutzpflaster können mit Wasser und Seife gewaschen werden. Nicht reiben und an der Luft trocknen lassen.
- Die Schutzpflaster können mindestens 30 Mal bei unverminderten Eigenschaften gewaschen werden.

ZUSAMMENSETZUNG: 91% Silikon, 9% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

MILLET Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2014.



EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable

EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable

RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS
DISTRIBUTION OF PRESSURE AND FRICTION

DÉCOUVREZ
LA GAMME EPITACT® SPORT
DISCOVER
THE EPITACT® SPORT RANGE

www.epitactsport.com

19371-D - 04/2019

